Traduction de Bruno Devillers



Wireless Visual Ear Pen

Manuel d'utilisation

Model: U0010



Traduction de Bruno Devillers

Caractéristiques du produit

- · Connexion sans fil
- · Hotspot wifi intégré
- · Visualisation en temps réel
- Gyroscope directionnel à six axes, qui peut réaliser une rotation du corps et garder l'angle de vue de l'objectif inchangé Corps en aluminium, peut rester à une température d'environ 25 degrés Celsius
- Conception ultra-mince de l'otoscope (3,9 mm), pénétration facile dans l'oreille.
- Éclairage sans ombre à lumière froide
- · Bouche, nez, oreilles, peau, usages multiples.
- · Convient aux smartphones et tablettes
- Pixels de l'objectif HD 130W



Traduction de Bruno Devillers

Détails du produit

Modèle: U0010

Diamètre de la lentille : 3.0mm

Focalisation de la lentille : 1,4-1,8cm

Pixel de l'objectif: 130W

Capteur de gravité : Six axes

Norme réseau : 802.11B/G/H

Antenne sans fil : 3dbi 2.4GHz intégrée

Antenne tubulaire en cuivre

Vitesse de transmission d'image : 30fps

Capacité de la batterie : 200mA h

Durée de fonctionnement de la batterie : environ 90 minutes

Entrée de chargement : DC5.0V/260mA

Port de chargement : Micro USB

Temps de chargement : environ 1,5 heure

Dimensions: D13 x 120mm (tube fin lg 20mm)

Poids net du produit : 14g

Matériau du produit : aluminium + plastique

Couleur: noir/rouge/vert

Température de fonctionnement : -10 à 50 °C

Made In China



Traduction de Bruno Devillers

Détails du produit



Conception ultra-mince de l'otoscope



Cuillère à oreille dédiée Deux longues et deux courtes



Matériau en aluminium Léger et dissipation rapide de la chaleur

Traduction de Bruno Devillers

Installation de l'App

 Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application Android ou iOS, ou chercher « TKSEE » dans l'App Store ou Google Play Store pour télécharger.






TKSEE

Connexion WIFI

Nom WIFI: HBY *****


Mot de passe WIFI: 12345678

Veuillez trouver ce WIFI sur votre appareil et vous connecter.

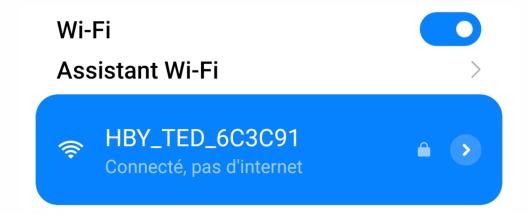

Traduction de Bruno Devillers

- 1. Après l'installation de l'application, veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le stylo auriculaire. Vous verrez alors que les voyants s'allument et que le hotspot wifi est prêt à être connecté.
- 2. cliquez sur "LIEN" pour trouver « HBY_****** hotspot wifi dans les paramètres wifi du téléphone portable et connectez-le avec succès. Ensuite, nous pouvons cliquer sur "DÉBUT" pour entrer dans l'écran d'affichage.

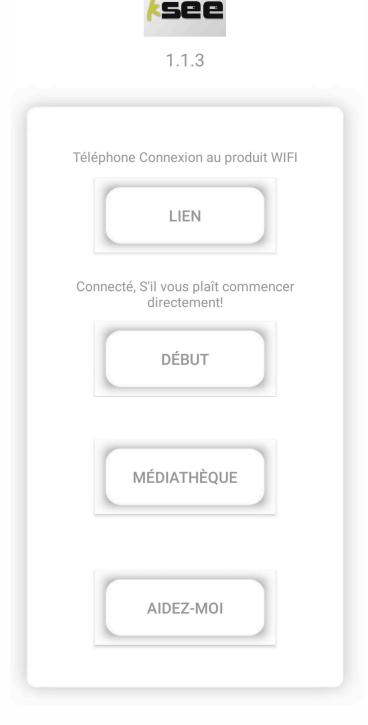

Traduction de Bruno Devillers

Écran de l'App Niveau batterie Éclairage On/Off Lumière ${ \bot / R}$ Photo Vidéo album Vue Vue Prendre Prendre Album ronde/ gauche photos une une carrée /droite photo vidéo et vidéos

Lorsque le WIFI est connecté avec succès, vous pouvez utiliser l'otoscope normalement via une vue en temps réel.

Traduction de Bruno Devillers

Avertissement

- · Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants
- · Les enfants ne sont pas autorisés à l'utiliser seuls.
- La lentille ne peut pas être frappée avec des objets pointus. Si la lentille est sale, veuillez l'essuyer avec un peu d'alcool.
- Ne pas le laisser tremper dans l'eau pendant une longue période.
- · Veuillez utiliser et stocker ce produit à température ambiante
- La première fois que vous l'utilisez, vous pouvez enfoncer doucement la cuillère dans votre oreille en la sentant, puis regarder sur l'application, ce qui permet d'éliminer la peur psychologique et d'éviter une mauvaise utilisation.

Liste du paquet

Otoscope 1PCS
Cuillère à oreille 4PCS
Câble de chargement USB-Micro 1PCS
Manuel d'utilisation 1PCS
Boîte d'emballage 1PCS